

اندیکاتور تست شست و شو Steri-Wash

کد محصول: STWC-101

اندیکاتور تست شستشو Steri-Wash برای بررسی قابلیت دستگاه های شستشو در از بین بردن اجرام و بافت ها روی ابزارها طراحی شده است.

در بیمارستان ها و مراکز درمانی، فاصله زمانی بین استفاده از ابزار و استریل مجدد آنها وجود دارد. معمولاً پس از عمل جراحی، ابزارها هنوز حاوی ضایعات باقیمانده، مانند خون و بافت بدن بیمار هستند. پاکسازی ضایعات خشک شده بسیار سخت بوده و با استفاده از دستگاه شست و شو، ضروری است که با شبیه سازی اجرام سخت، کیفیت شست و شو را بررسی کنید.

اندیکاتور تست شست و شو Steri-Wash دارای جرمی سخت است و توسط یک نگهدارنده استیل ضد زنگ STWC – 102 بکار می رود. در دورترین محل شستشو داخل دستگاه قرار داده می شود که در صورت درست کار کردن دستگاه شستشو می توان از صحت شستشو اطمینان حاصل کرد.



شرایط نگهداری:

- در دمای اتاق (۱۰-۳۸ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۱۰-۷۰٪ نگهداری شود.
- دور از عوامل اکسیدکننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود. دور از نور خورشید نگهداری شود.
- اندیکاتورهای استفاده نشده را در بسته بندی مخصوص خود به صورت عمودی نگهداری کنید.

ویژگی ها:

- همراه با نگهدارنده فلزی با دوام (جزو محصول نیست)
- مقرون به صرفه
- استفاده آسان
- مطابق با استاندارد ISO-17664:2017
- جزء زباله های عفونی محسوب نمیشود

خصوصیات عملکرد:

قبل از استریلیزاسیون خطا صحیح



تغییر رنگ:

در یک فرآیند شستشو صحیح، با پاک شدن جرم روی اندیکاتور، قابل تشخیص است.

تاریخ انقضا:

۴۸ ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220034

GTIN: 8719992310371

IRC: 9815079586910946



IU026-VER.1
STWC-101